

Kort bruksanvisning: Inhalera med nebulisatorn

PARI LC SPRINT®



1

Tvätta alltid händerna nogga före varje inhalering.



2a

Anslut munstycke eller mask.



2b

Vid användning av en BABYmask, använd BABYvinkeln. Rikta in masken utifrån hur babyn ligger.



3

Koppla ihop nebulisator och kompressor med anslutningsslangen. Anslut kompressorn till elnätet.



4

Öppna locket.



5

Fyll på inhalationslösning och stäng locket.



6

Sitt upprätt och avslappnat. Slå på apparaten.



7a

Sätt munstycket mellan tänderna och låt läpparna sluta tätt om munstycket.



7b

Håll nebulistorn upprätt. Masken måste sluta tätt.




8

Andas in långsamt och djupt. Vid för snabb inandning alstrar det integrerade PIF-Control systemet ett motstånd. Andas in långsammare när du märker detta.



9

Stäng av apparaten. Ta av nebulisatorn från slangen. Vid ev. kondens i slangen se komplett bruksanvisning.

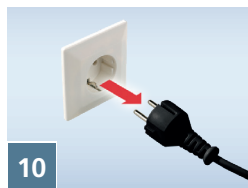

10

Ta ur kontakten från vägguttaget.

Ett förändrat ljud från nebulisatorn signalerar att inhalationen kan avslutas.

Kort bruksanvisning: Hygien och underhåll av **PARI LC SPRINT®** nebulisatorer – för hemmabruk



1

Rengöring efter varje användning

- Plocka isär nebulisatorn.
- Rengör med varmt vatten och lite diskmedel.
- Spola alla delar noggrant under rinnande vatten.



2

Desinfektion en gång om dagen

- Kokas i en tillräcklig mängd vatten (5 minuter).
- eller
- I vaporisator (ångdesinfektor, egentligen för nappflaskor).



3

Torkning efter varje rengöring och/eller desinficering

- Lägg delarna på en torr, luddfri duk.



4

Förvaring

Förvara delarna på en torr och dammfri plats.



5

Underhåll: minst en gång per år

Byt luftfilter, nebulisator och anslutnings slang (PARI årsförpackning).
Byt tidigare om rengöring ej kan ske eller vid skada.


Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning.
Dessa medföljer apparaterna. Saknas bruksanvisningen kan den beställas på **020 78 80 35**.

MEDI PLAST®

Medioplast AB

Bronsåldersgatan 2
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

www.pari.com

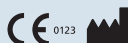

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · GERMANY · Tel: +49 (0)8151 279 0 · E-Mail: info@pari.de · www.pari.com