

## TIPS FÖR HYGIEN

### Snabbguide

Läs igenom och beakta detaljerna i bruksanvisningen.

#### Desinficering

1. VORTEX kan desinficeras tillsammans med tillbehör (t.ex. masker) i autoklaven.



2. Som alternativ kan VORTEX även desinficeras i kokande vatten: lägg alla delar i kokande vatten i minst 5 minuter. Se till att VORTEX och tillbehör (t.ex. masker) är helt täckta med vatten.



#### Torkning

3. Låt VORTEX och tillbehören torka vid rumstemperatur. Tack vare de antistatiska egenskaperna hos VORTEX kan den även torkas med en ren kökshandduk.



#### Förvaring

4. Sätt ihop alla delarna på VORTEX igen och förvara dem på en torr, dammfri plats.

## PASSANDE UTRUSTNING FÖR ALLA ÅLDRAR



**VORTEX® med babymask  
nyckelpiga\***  
0–2 år  
Artikelnummer: 51G5021



**VORTEX® med barnmask  
groda**  
från 2 år  
Artikelnummer: 51G5041



**VORTEX®**  
från 4 år  
Artikelnummer: 51G5001



**VORTEX® med vuxenmask\***  
Artikelnummer: 51G5061

\*produkter med hjälpmedlet med enhandsgrepp

## TILLBEHÖR:



**Babymask nyckelpiga**  
0–2 år  
Artikelnummer: 41G0712



**Barnmask groda**  
från 2 år  
Artikelnummer: 41G0714



**VORTEX® munstycke**  
10-pack  
Artikelnummer: 51G5101



**Vuxenmask soft**  
med maskanslutning  
Artikelnummer: 51G0740



PARI GmbH  
Moosstraße 3  
82319 Starnberg, GERMANY  
Email: info@pari.de

www.pari.com

MEDI PLAST

**Distributör:**  
Mediplast AB  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com  
Tel: 020 78 80 35

051D0131-A-02-2018



**NYA  
GENERATIONEN**



**VORTEX®**

ANSLUT. ANDAS.

SLAPPNA AV.

Tips för användning och hygien

www.pari.com

## TIPS FÖR HANDHAVANDE

### Förbereda och genomföra en inhalation

1. Ta bort skyddslocket från dosaerosolen. Skaka dosaerosolen kraftigt.




2. Fäst sedan dosaerosolens munstycke i den blå anslutningsringen på VORTEX. Ta därefter bort det blå skyddslocket på VORTEX.



3. Sätt munstycket på VORTEX mellan tänderna och slut läpparna runt det. Tryck ned dosaerosolen en gång med ett finger för att utlösa en puff.



4. Andas in djupt och långsamt. Håll andan en kort stund och andas ut igen via munstycket. Då öppnas ventilerna så att utandningsfasen, till exempel hos barn, är lättare att se.

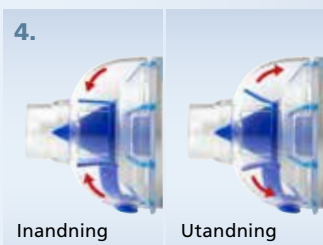

Om den behandlande läkaren har ordinerat två eller fler puffar per användning: upprepa steg 3 och 4.

## ANVÄNDNING AV

## NYHET

### HJÄLPMEDLET MED ENHANDSGREPP

Hjälpmedlet med enhandsgrepp gör handhavandet av VORTEX nu ännu lättare: att hålla och samtidigt utlösa dosaerosolen underlättas därmed avsevärt.\*

1. Skjut på hjälpmedlet med enhandsgrepp bakifrån på VORTEX.



2. Justera hjälpmedlet med enhandsgrepp genom att skjuta den framåt eller bakåt, så att fattningen på hjälpmedlet med enhandsgrepp går över dosaerosolen. Positionen på hjälpmedlet med enhandsgrepp kan vara olika på olika dosaerosoler.

3. Eftersom dosaerosolen inte har en standardiserad form och storlek kan det i vissa fall hända att dosaerosolen inte kan utlösas med hjälp av hjälpmedlet med enhandsgrepp. Använd i så fall VORTEX och dosaerosolen som vanligt utan hjälpmedlet med enhandsgrepp.

Barn under 18 månader bör inhalera 4 till 6 andetag, barn över 18 månader 2 till 4 andetag.



## TIPS FÖR HYGIEN

### Isärtagning av VORTEX®

1. Ta bort munstycket och ev. masken och övriga tillbehör. Den blå anslutningsringen ska sitta kvar. Se till att det blå skyddslocket är öppet.



### Rengöring

2. Rengör alla delar noggrant i varmt kranvatten med lite diskmedel.



3. Skölj av alla delar noggrant med rent vatten.



4. Som alternativ kan VORTEX även rengöras i diskmaskin. Placera alla delar – VORTEX andningsbehållaren och munstycket stående, alla andra delar liggande – i korgen och välj ett program med en vattentemperatur på minst 50 °C.



\*produkter för hjälpmedlet med enhandsgrepp, se baksidan